




medi

medi Patella tendon support

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Návod k použití. Uputa za uporabu. Інструкція по використанню. Kullanma kılavuzu. Használati útmutató. Uputstvo za upotrebu. Інструкція з використання. Navodila za uporabo.

medi. I feel better.

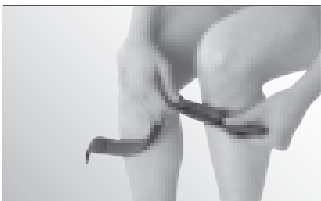

1



2



3

medi Patella tendon support

Назначение

medi Patella tendon support – это бандаж для связок коленной чашечки. Данное изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения коленной чашечки; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Пателло-фemorальный синдром
- Легкая нестабильность коленного сустава

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены

Каков механизм действия бандажа?

Давление, оказываемое на сухожилие четырехглавой мышцы бедра, оказывает проприоцептивный эффект и таким образом усиливает мышечную поддержку коленного сустава

Как часто и когда следует применять бандаж?

Только регулярное использование гарантирует оптимальный медицинский эффект.

Как надевать бандаж?

- Расположите расстегнутый бандаж так, чтобы подушечка находилась под надколенником
- Протянув ленту через петлю, зафиксируйте застежку-липучку.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

лайкра

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!